

SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltestkassette



**ZU HAUSE
BLEIBEN
LEBEN
RETTEN**



Einfach zu verwenden

Keine Ausrüstung erforderlich

Schnelle Ergebnisse innerhalb von 10 Minuten

Hohe Empfindlichkeit und Spezifität


DiagnoSure SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest ist eine schnelle Chromatographie Immunoassay zum qualitativen Nachweis spezifischer Antigene gegen SARS-CoV-2 im menschlichen Nasopharynx vorhanden.

✓ **PROBENTNAHME**

PROBENTNAHME

Führen Sie den Tupfer parallel zum Gaumen durch das Nasenloch (nicht nach oben), bis ein Widerstand auftritt oder der Abstand dem vom Ohr zum Nasenloch des Patienten entspricht, was auf einen Kontakt mit dem Nasopharynx hinweist. Reiben und rollen Sie den Tupfer vorsichtig. Lassen Sie den Tupfer einige Sekunden lang an Ort und Stelle, um Sekrete aufzunehmen. Entfernen Sie den Tupfer langsam, während Sie ihn drehen.

Nasopharyngealabstrich

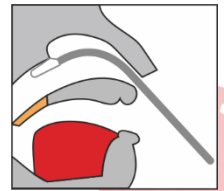


✓ **Genauere Ergebnisse**

Methode	Ergebnisse	RT-PCR		Gesamtergebnisse
		Positiv	Negativ	
DiagnoSure SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltestkassette	Positiv	38	3	41
	Negativ	2	360	362
Gesamtergebnisse		40	363	403

Empfindlichkeit: 95.0% Spezifität: 99.2% Richtigkeit: 98.8%

✓ **Bequemes Verfahren**

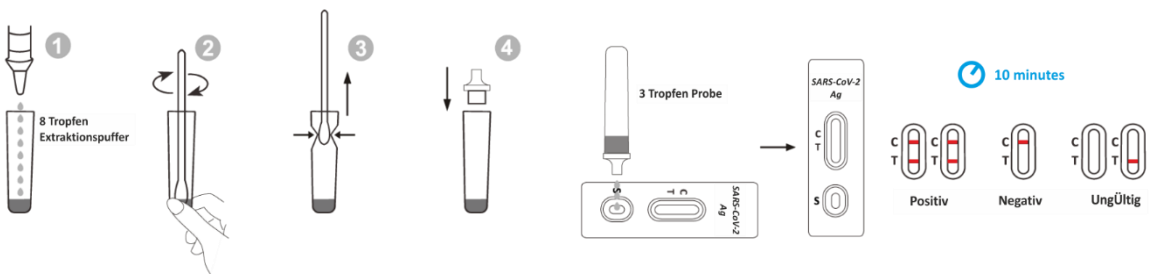

✓ **Bestellinformationen**

Cat.No.	Produkt	Probe	Format	Pack
SCRT-G26	DiagnoSure SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest	Nasopharyngealabstrich	Kassette	25T